



Notice d'Utilisation Orthèse InnovPulse®



Vous venez de bénéficier d'un appareil orthopédique.

Afin de vous garantir un confort optimal, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice.

Votre orthèse releveur de pied a été fabriquée par un orthoprothésiste agréé sur prescription ou avis de votre médecin.

Les instructions concernant le port de l'orthèse sont définies par votre médecin prescripteur, il faut les respecter strictement.

Sa confection a été réalisée à vos mesures, et votre appareil ne doit être porté que par vous-même et ne doit pas être modifié.

Contenu / Description :

Un Releveur de pied dynamique :

- Prévient tout déséquilibre latéral.
- Stabilise la cheville
- Restitue une impulsion pour la marche

Une sangle de maintien.

Une notice du produit, à lire attentivement.

Indications possibles :

- Paralysies du nerf sciatique poplité externe (SPE)
- Paralysies du nerf sciatique poplité interne (SPI)
- Paralysie sciatique radiculaire par hernie discale L5 ou S1
- Sclérose en plaques (SEP)
- Sclérose latérale amyotrophique (SLA)
- Poliomyélite (PAA)
- Syndrome de Guillain-Barré
- Spina bifida
- Infirmité motrice cérébrale (IMC)
- Séquelles d'accidents vasculaires cérébraux (AVC)

- Maladie de Charcot Marie Tooth (CMT)
- Myopathie de type Facio-Scapulo-Humérale
- Traumatismes du pied, de la cheville et de la jambe

L'orthèse est indiquée dans diverses pathologies de l'enfant et de l'adulte, maladie ou traumatisme, acquise ou congénitale, centrale ou périphérique, du nerf ou du muscle entraînant un pied tombant avec steppage à la marche et impossibilité de la course à pied, responsable de chutes.

Consignes de sécurité :

Cet article ne doit être utilisé que sous supervision médicale. Il n'est pas destiné au libre usage du public. Consulter immédiatement le médecin traitant en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Hygiène et entretien :

Une hygiène corporelle quotidienne permet de réduire les risques d'irritation.

Changer de chaussettes tous les jours.

La fréquence minimum de nettoyage de l'appareil est d'une fois par semaine. Elle peut être augmentée en fonction de votre activité, et du temps de port de votre appareil.

- Nettoyage à la main et au savon - température maximale 40°C,
- Rincer soigneusement, afin d'éliminer toute trace de détergent qui pourrait provoquer l'irritation de la peau.
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,

Matière carbone : Laver, intérieur et extérieur, à l'aide d'un chiffon mouillé,

Les velcros: brosser les de préférence sans les mouiller.

Les peausseries: Laisser sécher dès qu'elle n'est plus portée et pulvériser un produit bactéricide et fongicide (en vente en pharmacie et magasin spécialisé).

Composition :

Fibre de carbone / Kevlar : 80%, Mousse 3D : 15%, Nylon / Velcro : 5%,





Mise en place et suivi :

Pour votre confort et pour faciliter l'entretien de votre orthèse, portez-la avec des chaussettes.

❶ (Figure 1)

A – Insérer l'orthèse dans la chaussure. Défaire les lacets au maximum si nécessaire.

B – Placer le pied dans l'orthèse releveur et dans la chaussure.

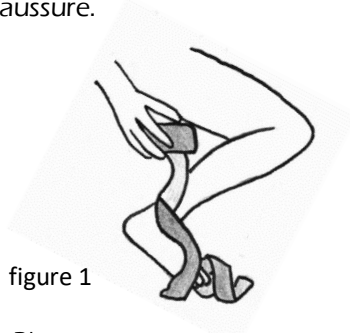


figure 1

❷ (Figures 2)

A – Tenir le haut de l'orthèse à deux mains.

B – Passer la jambe dans le haut de l'orthèse.



figure 2.1



figure 2.2

❸ (Figure 3)

A – Attacher et fixer la lanière supérieure en velcro® ou l'attache.



figure 3

❹ (Figure 4)

A – Lacer la chaussure

B – Ajuster si nécessaire le serrage de la lanière supérieure de l'orthèse.



figure 4

Stockage :

L'orthèse doit être entreposée à l'air ambiant dès qu'elle n'est plus portée.

De très fortes chaleurs peuvent entraîner leur détérioration, il est déconseillé de l'entreposer près d'une source de chaleur (radiateur, cheminée...) ou derrière une vitre au soleil (voiture, véranda, fenêtre...)

Ne pas le laisser à la portée des animaux domestiques.

Précautions :

En cas de besoin, vous pouvez prendre rendez-vous pour un contrôle de votre appareillage. Et vous devez nous contacter rapidement dans les cas suivants :

- douleurs dues à l'appareil.
- rougeurs persistantes.
- altération du système de fermeture.
- modification de votre poids.

Pour que votre orthèse reste adapté(e), il est nécessaire d'éviter toute prise ou perte de poids importante.

Avertissement: Si votre médecin vous autorise la pratique d'une activité sportive ou la conduite d'une voiture avec votre orthèse, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre compagnie d'assurance.

Ne pas utiliser l'orthèse sans chaussure.

L'orthèse n'est pas prévue pour une utilisation sans chaussure.



InnovPulse SAS
4 rue du Coteau
Pôle Santé – Le Razat
69390 VERNAISON
+33(0)4.82.53.16.98
contact@innovpulse.eu

Déclaration CE pour les dispositifs médicaux sur mesure.

La société InnovPulse certifie que cet appareil est à usage exclusif du patient cité ci-dessus. Cet appareil est conforme aux exigences essentielles de l'annexe I du décret 95-292 à l'exception du paragraphe 13-3 relatif à l'étiquetage, s'agissant d'un dispositif sur mesure, non emballé, dont l'identification est évidente pour l'utilisateur.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification sur les informations recueillies. Celles-ci sont exclusivement destinées à notre usage interne, et à votre organisme payeur.

Le délai de garantie de votre appareil est de dix-huit mois.

La garantie ne s'applique pas:

En cas de dégradation de l'orthèse suite à une utilisation sans chaussure.

En cas de variations physiologiques ou pathologiques de la morphologie du patient.

En cas d'accident, lorsqu'il n'est pas démontré que celui-ci est imputable à la mauvaise qualité des matières ou à un défaut de fabrication.

En cas de défaut d'entretien imputable à l'utilisateur et dans tous les cas d'espèces pouvant être arbitrés par les commissions médicales d'appareillage.